
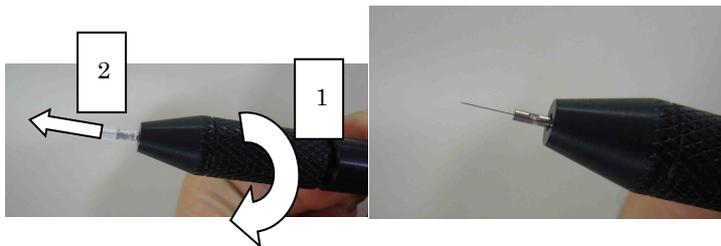
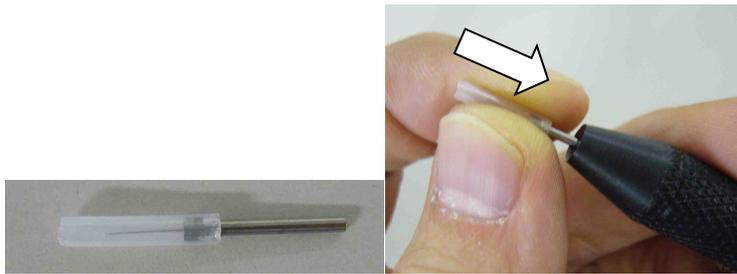


マイクロ絶縁針電極（形状 No.H137）使用方法

マイクロ絶縁針電極（形状 No.H137）（単回使用）は専用のハンドピース「マイクロ絶縁針用ハンドピース」が必要です。電極固定口の形状が通常のハンドピースと違います。

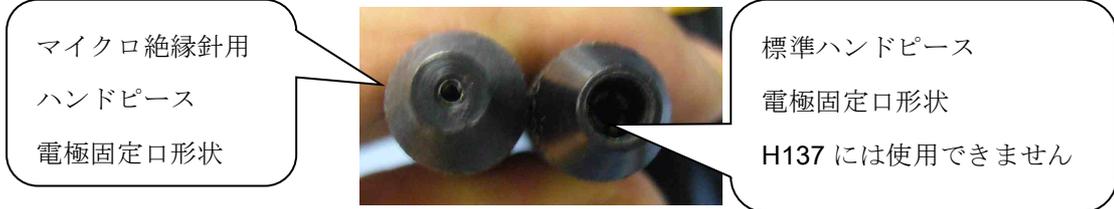

準備が整いました。これで使用できます。（注：先端が非常に細いので注意してご使用ください。）

サージトロン FFPF/EMC の場合 【モード：止血／凝固 出力：1 以下】

サージトロン DualEMC/pelleve S5 の場合 【モード：止血／凝固 出力：2】



注：通電部は非常に細いため取扱は慎重に行ってください。曲がったりした場合は絶縁部分が剥がれた可能性があるため、新しい電極と交換してください。